


1 使用前準備

プラーク採取プラスチックのA側のキャップを取ります。
歯間ブラシも準備します。

【注意事項】

- ・B側のキャップは取らないでください！
- ・取り外したキャップは使用しますので捨てないでください。

②プラーク採取 プラスチック本体

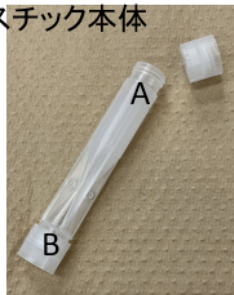

③歯間ブラシ



2 プラーク(検体)の採取

歯間ブラシを利用して、目的の歯間に挿入し2～3回往復させてプラークを歯間ブラシに絡める。

【注意事項】

- ・必ず手袋を着用して作業を行ってください。
- ・採取量の目安はブラシに付着してプラークが目視できる程度です





3 プラーク採取プラスチック容器への挿入

プラークを採取した歯間ブラシをプラーク採取プラスチックのA側から挿入してキャップを閉めます

【注意事項】

- ・歯間ブラシが隠れるように採取容器本体に挿入してください。
- ・キャップは十分に閉めてください。

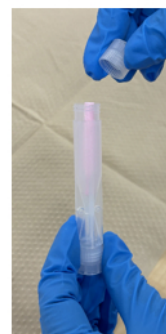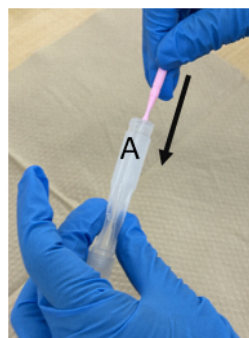

4 採取後の容器

図のようになれば
プラークの採取完了です

